

SKRÓCONE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa: URGO na Afty i drobne rany w jamie ustnej

Kategoria produktu: wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Gotowy do użycia opatrunek w płynie do stosowania w leczeniu aft (1 do 2 aft o średnicy <1 cm) i drobnych ran w jamie ustnej.

Instrukcja użycia*: Wyjmując szpatułkę z butelki wytrzymaj jedną stronę o brzeg butelki. Nanieś preparat na aftę lub ranę drugą stroną szpatułki do całkowitego pokrycia zmienionego miejsca. Pozostaw do wyschnięcia. Po 10 sekundach od aplikacji utworzy się widoczny film. Jeżeli czujesz, że film nie pokrywa odpowiednio afty lub rany, nanieś preparat ponownie. Nakładać 3 do 4 razy dziennie, najlepiej przed głównymi posiłkami, nie usuwając warstwy produktu z poprzedniej aplikacji. Stosować aż do całkowitego wygojenia (3-5 dni). Skład preparatu zapewnia higienę i nie ma konieczności czyszczenia szpatułki.

Przeciwwskazania: Nie stosować: w przypadku owrzodzenia jamy ustnej o śr. większej niż 1 cm lub opryszczkowego owrzodzenia jamy ustnej (duża liczba małych owrzodzeń), które wymagają konsultacji lekarskiej; na zainfekowane rany, oparzenia i głębokie rany krwawiące; w przypadku alergii na pochodne kwasu salicylowego. Nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci. Produkt może być stosowany od 18. roku życia.

Informacje dla użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem: w przypadku alergii na pochodne kwasu salicylowego. Nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci. Produkt może być stosowany od 18. roku życia.

Producent/Wytwórca: Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42, rue de Longvic – 21300 Chenôve - France

Dystrybutor: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

*informacja nieobligatoryjna